

# Silesse™

Film protettivo

Crea una sottile barriera protettiva tra cute e placca, proteggendola dal contatto con gli effluenti



## Come utilizzare Silesse™ - Spray protettivo



1. Agita la bomboletta
2. Applica lo spray in maniera uniforme sopra la cute mantenendo una distanza di circa 10 - 15 cm
3. Attendi qualche istante fino a che la pelle sia asciutta
4. Applica il nuovo sistema di raccolta

## Come utilizzare Silesse™ - Salviette protettive



1. Passa la salvietta uniformemente sulla cute
2. Attendi qualche istante fino a che la cute sia asciutta
3. Applica il nuovo sistema di raccolta

PRODOTTO	CODICE	ISO 1999	ISO 2017
SALVIETTE	TR 103	09.18.30.006	09.18.30.009
SPRAY	TR 104	09.18.30.006	09.18.30.009

# Niltac™

Rimuovi adesivo

Aiuta a rimuovere in modo delicato la placca ed a eliminare i residui di adesivo dalla cute



## Come utilizzare Niltac™ - Spray



1. Applica lo spray dall'alto direttamente sulla placca da una distanza di circa 10 - 15 cm
2. Dopo qualche istante la barriera si staccherà molto facilmente dalla pelle

## Come utilizzare Niltac™ - Salviette



1. Dopo aver rimosso il dispositivo strofina la salvietta sulla pelle intorno alla stomia per rimuovere i residui di adesivo o di pasta

PRODOTTO	CODICE	ISO 2017
SPRAY	TR 101	09.18.30.009
SALVIETTE	TR 102	09.18.30.009